


PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN PERINATAL POR ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO B

AGAR GRANADA  
**FÓRMULA ORIGINAL**  
Creada por el  
Dr de la Rosa

# El medio **GRANADA™ ORIGINAL**

para el screening e identificación de  
estreptococos del Grupo B

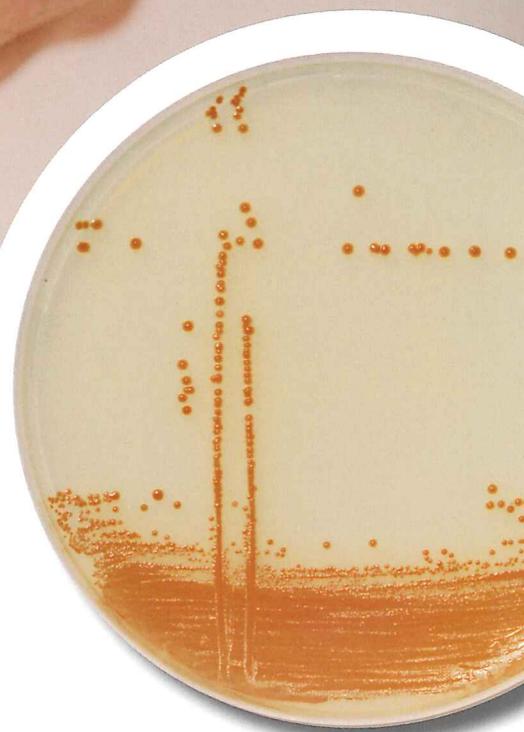

El diagnóstico  
como fuente de salud

  
BIOMÉRIEUX

# El medio GRANADA™ ORIGINAL

## ➔ Prevención de la infección perinatal por estreptococos del Grupo B

Organismos oficiales como el CDC\*\* recomiendan el screening y la profilaxis antibiótica del SGB durante el parto.

Dichas directrices recomiendan:

- Screening prenatal universal para colonización rectal y vaginal de SGB en embarazadas entre las semanas 35-37, usando medios de cultivo para valorar la necesidad de profilaxis antibiótica durante el parto.

## ➔ Agar GRANADA, para el screening de estreptococos del Grupo B (SGB).



### El Medio Original

“ El medio Granada es un medio selectivo y diferencial diseñado y desarrollado en el hospital Virgen de las Nieves de Granada (España) en 1992 y mejorado en 2005. Permite la detección e identificación rápida y fácil de *Streptococcus agalactiae* (estreptococos del Grupo B, SGB) en muestras clínicas.

El medio tiene una especificidad del 100% para SGB. Usa Granadina, un pigmento rojo poliénico para diferenciar los SGB de otras bacterias patógenas. Aprovecha todas las ventajas del efecto del metotrexato en los SGB para incrementar su producción de pigmento. El medio Granada también inhibe el crecimiento de la mayoría de las bacterias que no pertenecen a las especies de *S. agalactiae*, así como el de las levaduras. ”

Dr. Manuel de la Rosa,  
Creador del medio Granada

## ➔ Mayor Fiabilidad: Una Solución Validada

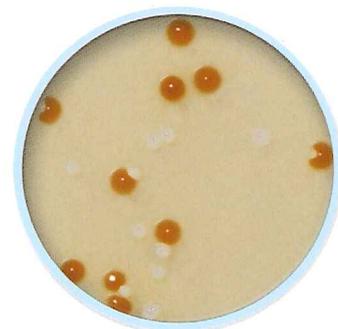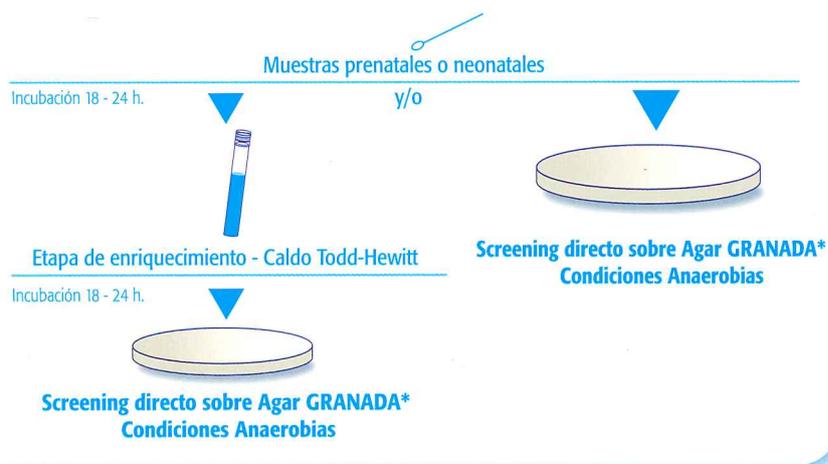

*Streptococo B*  
(colonias características de color rojo a naranja)  
y *Enterococcus faecalis*  
Incubación a las 24 horas

Agar Granada ..... Ref. 43 712 - Kit de 20 placas  
Medio específico para el screening de SGB  
Caldo Todd-Hewitt + antibióticos ..... Ref. 42 116 - Kit de 20 x 9 ml tubos  
Caldo de enriquecimiento selectivo para SGB

bioMérieux España S.A. bioMérieux México S.A. de C.V.  
Manuel Tovar, 45-47 Chihuahua 88, Col. Progreso  
28034 Madrid 01080 D.F. México  
España Tel.: (52) 55 54873550  
Tel. : 91.358.11.42 Fax: (52) 55 56162245  
Fax : 91.358 .06.29  
www.biomerieux.es  
www.biomerieux.com

Agar GRANADA es un producto con marca

B I O M É R I E U X